



· 세이프란 오토의 간편한 사용법 | Convenient process of SafeLan®-Auto



○ Step 1

단타 및 연타의 두 가지 사용모드 중 사용목적에 적합한 모드를 선택 합니다. 랜셋을 앞 나사선에 맞춰 끝까지 돌려 끼운 후 보호팁을 제거 합니다.
First of all, select one of the two modes one is single shot mode and the other is repeating mode. Turn the sterilized needle, SafeLan® clock wise on the SafeLan®-Auto matching the screw thread until it is locked up. pull the protective tip of the lancet to discard.

○ Step 2

무통부를 당겨 좌 · 우로 돌려 깊이를 조절합니다.
Select a penetration depth by pulling the part named "No pain part" and then turn it left or right.

○ Step 3


손잡이를 잡고, 시술하고자 하는 부위에 수직으로 랜셋을 위치시킨 후 작동버튼을 눌러 시술을 합니다.
Put the device, SafeLan® on the area you want to prick and press the push button.

○ Step 4

사용한 랜셋은 체결 시와 반대방향으로 돌려 분리합니다.
Turn the used lancet counterclockwise until it is detached.

세이프란 오토 기능

Product Function

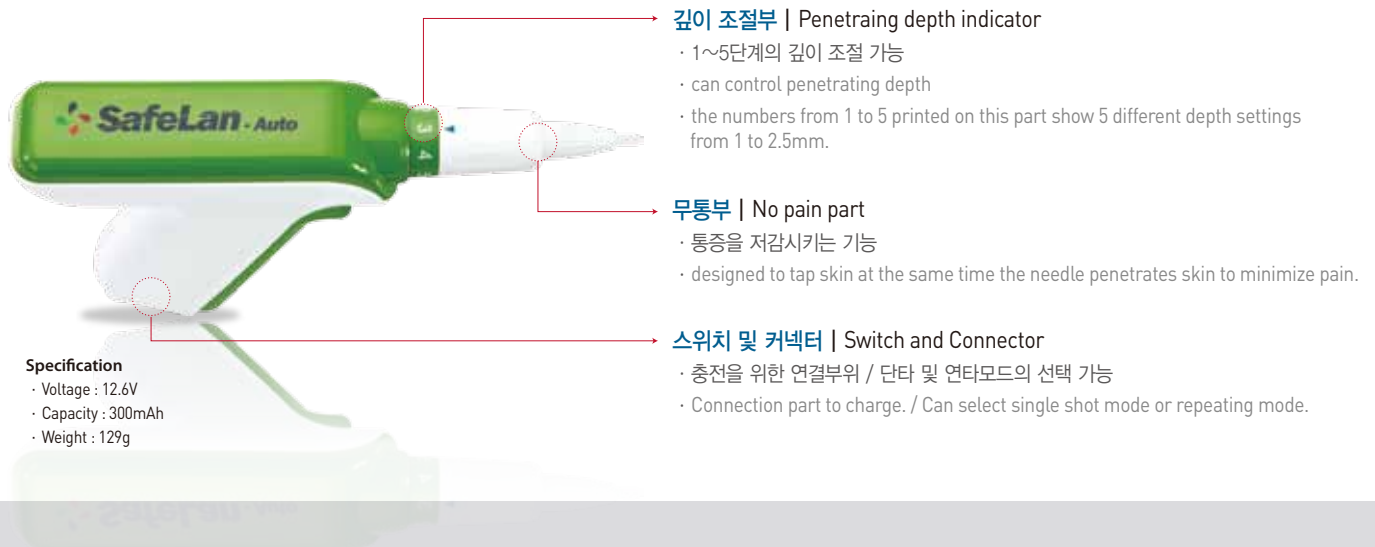

Specification

- Voltage : 12.6V
- Capacity : 300mAh
- Weight : 129g

깊이 조절부 | Penetrating depth indicator

- 1~5단계의 깊이 조절 가능
- can control penetrating depth
- the numbers from 1 to 5 printed on this part show 5 different depth settings from 1 to 2.5mm.

무통부 | No pain part

- 통증을 저감시키는 기능
- designed to tap skin at the same time the needle penetrates skin to minimize pain.

스위치 및 커넥터 | Switch and Connector

- 충전을 위한 연결부위 / 단타 및 연타모드의 선택 가능
- Connection part to charge. / Can select single shot mode or repeating mode.



FineTap (Needle) 기능

The function of Fine Tap

- 01/ 니들(Needle)과 보호캡이 일체형
All-in one type of needle & protective cap.
- 02/ 니들(Needle)의 직경이 0.2mm로 매우 작고 솔잎형 모양으로 인해 통증을 최소화
Minimize pain as diameter of needle by 0.2mm & pine-shape in it's apperance.
- 03/ 니들(Needle)이 외부로 노출되지 않아 사용상 부주의로 인한 위험성 제거
The removal of dangerousness by carelessness as needle is not exposed.
- 04/ 단계별 자입 깊이 0.25mm / 0.63mm / 1.00mm / 1.38mm / 1.75mm
0.25mm / 0.63mm / 1.00mm / 1.38mm / 1.75mm per level according to penetration depth.



FineTap 특징

The feature of Fine Tap

- 01/ 이 · 미용 전동기기
Vibration apparatus of hair beauty.
- 02/ 피부 및 두피에 holes를 만들어 기능성 화장품의 흡수 용이
As make hole on skin & scalp, be enable to easy the absorption of functionality cosmetics.



FineTap (Device) 기능

Product Function

- 깊이 조절부 | Penetraing depth indicator**
- 1~5단계의 깊이 조절 가능
 - can control penetrating depth
 - the numbers from 1 to 5 printed on this part show 5 different depth settings from 1 to 1.75mm.
- 무통부 | No pain part**
- 통증을 저감시키는 기능
 - designed to tap skin at the same time the needle penetrates skin to minimize pain.
- 스위치 및 커넥터 | Switch and Connector**
- 충전을 위한 연결부위
 - 단타 및 고속 연타모드의 선택 가능
 - Connection part to charge.
 - Can select single shot mode or repeating mode & High velocity.
- Specification**
- Voltage : 12.6V
 - Capacity : 300mAh
 - Weight : 129g

