


SD “편안한 당뇨관리의 시작”  
**코드프리™**


순서대로 따라하면  
정확한 혈당측정이 가능합니다.

무료상담전화 : 080-970-9700

※ 단것을 만진 손으로 검사하면 측정값이 높게 나옵니다.

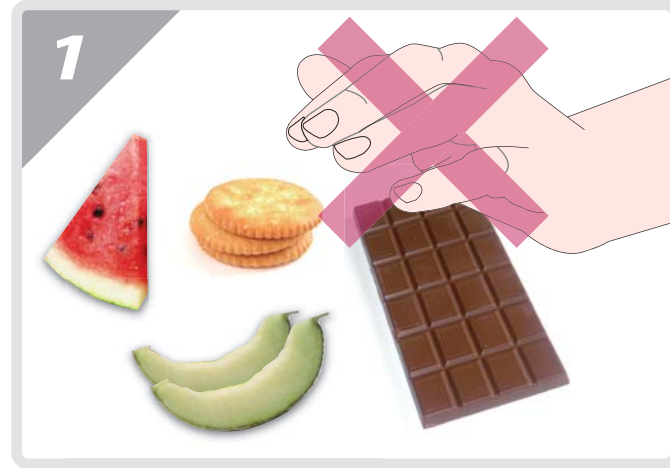

과일, 과자, 초콜릿 등 단 것을 만졌다면  
측정값이 잘못 나올 수 있습니다.

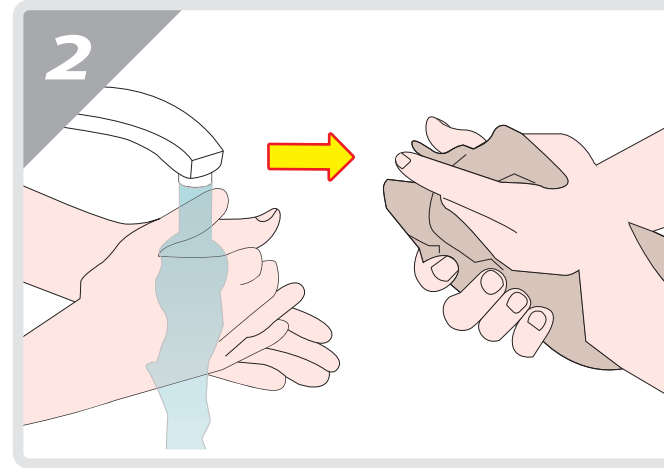


손을 깨끗이 씻고 말리면  
더 정확하게 혈당을 측정할 수 있습니다.


## I 채혈기 사용방법




채혈기와 채혈침을 준비해 주세요.

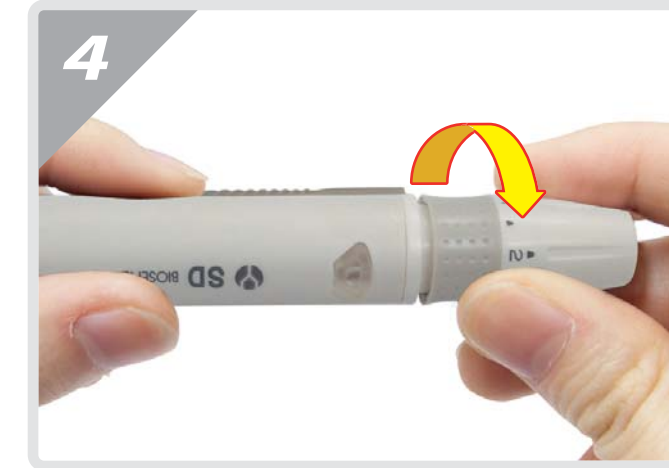

채혈기를 그림과 같이 잡고 시계 반대방향으로  
돌려 뚜껑을 엽니다.

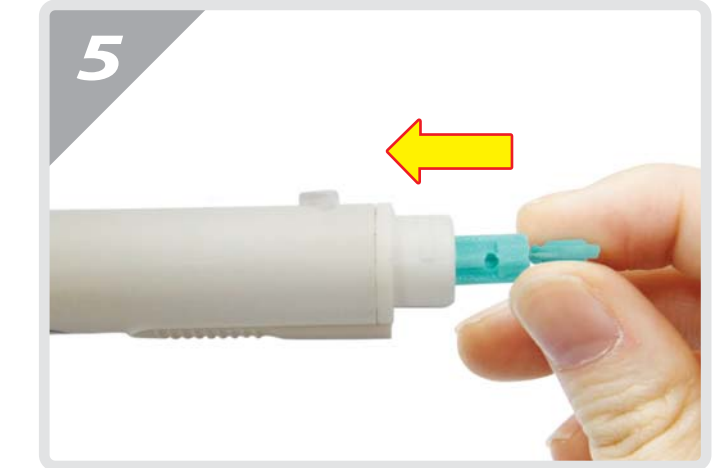


채혈기 침을 홈에 끝까지 끼워 넣습니다.

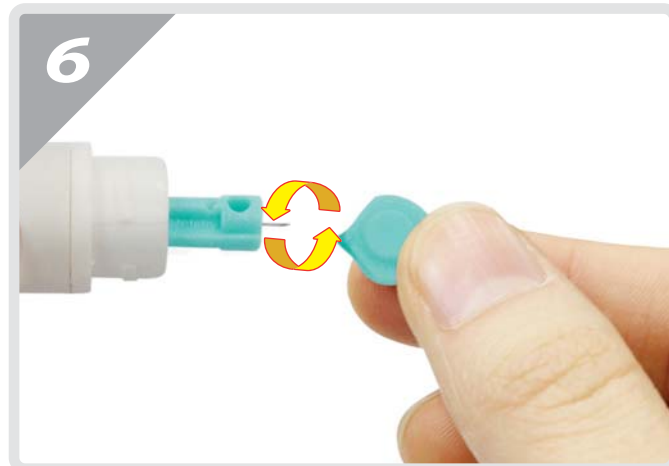

동그란 손잡이를 돌려 떼어 냅니다.



채혈기 뚜껑을 시계 방향으로 돌려 끼웁니다.

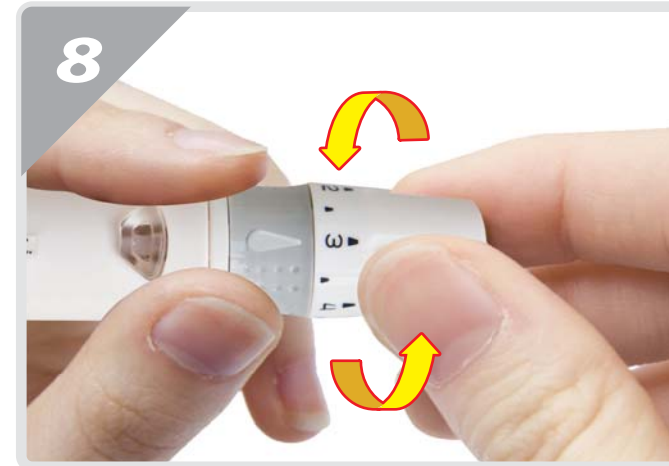

채혈기 뚜껑 앞 부분을 돌려 강약을 조절 합니다.

- ※ 숫자가 높을수록 깊게 채혈됩니다.
- ※ 손이 부드러운 사람은 1~2, 두꺼운 사람은 3~5를 맞춥니다.



채혈 손잡이를 뒤로 잡아 당깁니다.

채혈침이 장착되면  
색깔이 표시 됩니다.

## II 배터리 장착



건전지를 (+) 방향이 보이게 넣습니다.



건전지 덮개를 닫습니다.

### III 채혈 및 측정



12 <측정기> <검사지 통>  
검사지 통을 열어 검사지 한 개를 꺼냅니다.




13 "뚜껑 꼭 닫아주세요"  
검사지를 꺼낸 후 뚜껑을 꼭 닫아 주세요.



14  
검사지를 측정기에 넣습니다.



15  
화면에 혈액 방울이 깜빡이는지 확인해 주세요.  
※깜빡이지 않으면 시험지를 다시 끼워 주세요.

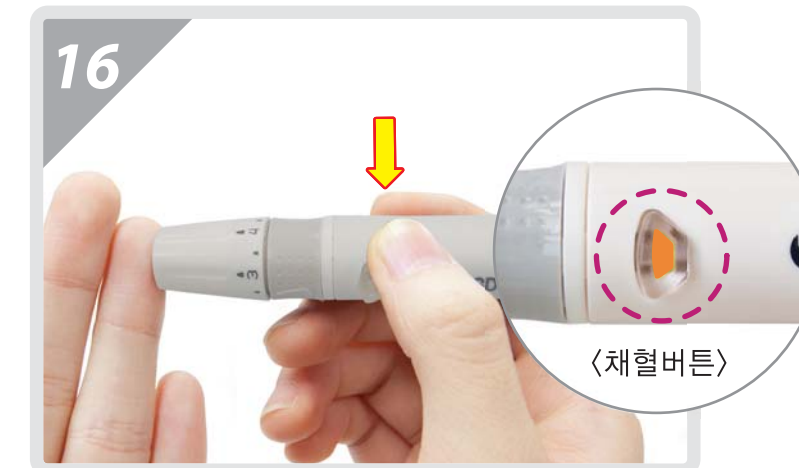

16  
채혈기를 손가락 끝에 밀착한 뒤 채혈 버튼을 눌러 주세요.

대한당뇨병학회에서 권장하는 혈당값입니다.

※ 혈당값 (mg/dL)

시간	정상	당뇨전단계	당뇨관리필요
공복	99 이하	100~125	126 이상
식후 1시간	180 이하	200 이상	200 이상
식후 2시간	140 이하	140~199	200 이상



17 "채혈된 주변을 살짝 눌러 주면 혈액이 나옵니다."  
채혈된 주변을 살짝 눌러 주면 혈액이 나옵니다.



18 "검사지를 혈액 방울 끝에 살짝 대줍니다."  
검사지를 혈액 방울 끝에 살짝 대줍니다.



검사지 위에 묻히기

슬듯이 묻히기



19 "혈당값 107"  
5초 후 측정값이 화면에 나타납니다.



주의  
※일회용 의료기기인 란셋과 혈당 측정 검사지의 경우 재사용 하지 마십시오.

SD 에스디 바이오센서(주)

-무료상담전화 -  
080 -970-9700